




**Welltec OCK5**

**skrótowa instrukcja**


**[www.welltec.pro/store](http://www.welltec.pro/store)**

**kontakt: <https://welltec.pro/store/kontakt>**


- 1** **EN** Insert the plug in the power socket.  
**PL** Włóż wtyczkę do gniazdka.

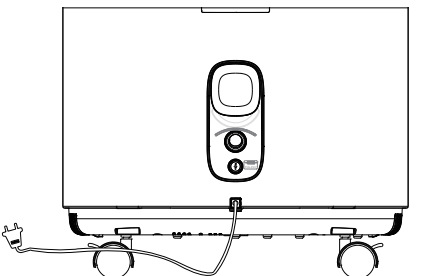


- 3** **EN** Pour purified / distilled water into the bottle in the range from MAX to MIN.  
**PL** Wlej czystą / destylowaną wodę do butelki w zakresie od MAX do MIN.

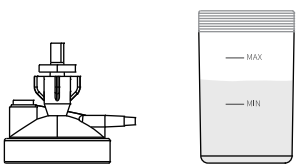


- 2** **EN** Take out the humidifier bottle and open the bottle cap.  
**PL** Wyjmij butelkę nawilzacza i otwórz nakrętkę butelki.

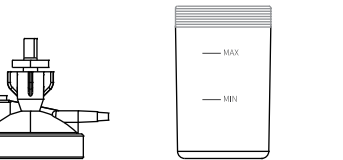


- 4** **EN** Put on the bottle cap.  
**PL** Załóż nakrętkę butelki.

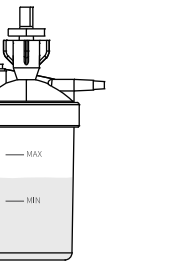


- 5** **EN** Put the humidifier bottle back into the holder.  
**PL** Umieść butelkę nawilzacza z powrotem w uchwycie.

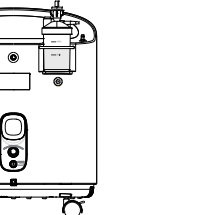


- 7** **EN** Connect port of the humidification bottle (A) to the nasal oxygen tube (B).  
**PL** Podłącz port butelki nawilżającej (A) do kaniuli nosowej (B).

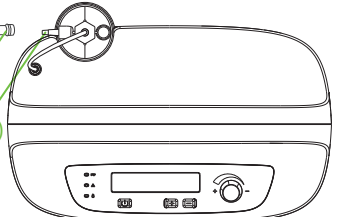


- 6** **EN** Connect the humidification bottle (A) to the oxygen outlet (B) using a tube (C).  
**PL** Podłącz butelkę nawilżającą (A) do wylotu tlenu (B) za pomocą rurki (C).

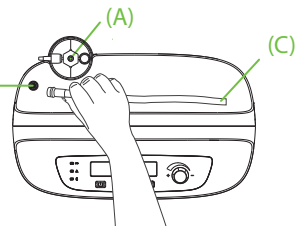


- 8** **EN** Press the power switch (A) to position „I” (ON).  
**PL** Ustaw przełącznik zasilania (A) z tyłu obudowy w pozycji „I” (ON).

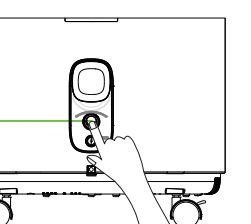


- 9** **EN** Press the button  on the front panel.  
**PL** Naciśnij przycisk  na przednim panelu.

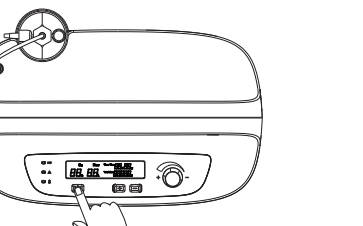

- 11** **EN** Press the button  or  to program the working time.  
**PL** Naciśnij przycisk  lub  aby zaprogramować czas pracy.

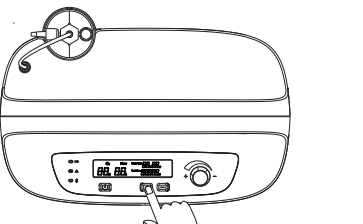

- 10** **EN** Twist the knob to adjust the flow.  
**PL** Przekręć pokrętkę, aby zmienić przepływ tlenu.

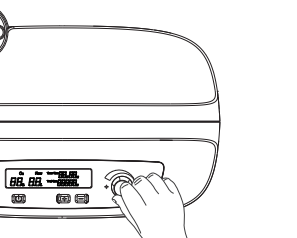


- 12** **EN** Important tips.  
**PL** Ważne wskazówki.


- EN** - Start the device according to the right sequence of the steps.  
- Do not touch the device with wet hands to avoid electric shock.  
**PL** - Uruchom urządzenie zgodnie z odpowiednią sekwencją kroków.  
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

## **EN** Atomization **PL** Nebulizacja


- 1** **EN** Unscrew the nut of the oxygen atomizer outlet (A).  
**PL** Odkręć nakrętkę portu nebulizatora w koncentratorze (A).

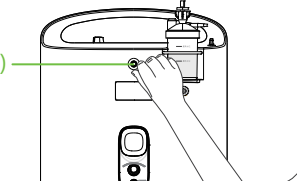


- 2** **EN** Connect the atomizing accessories.  
**PL** Podłącz akcesoria do nebulizacji.

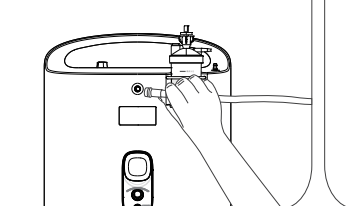


- 3** **EN** Using knob adjust the flow to minimum.  
**PL** Przekręć gałkę w prawo zmniejszając przepływ do minimum.

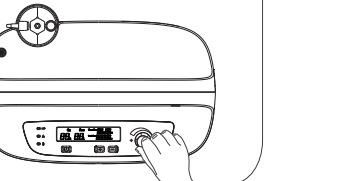


- 4** **EN** Insert the plug in the power socket.  
**PL** Włóż wtyczkę do gniazdka.

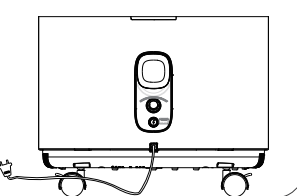

- 5** **EN** Press the power switch (A) to position „I” (ON).  
**PL** Ustaw przełącznik zasilania (A) z tyłu obudowy w pozycji „I” (ON).

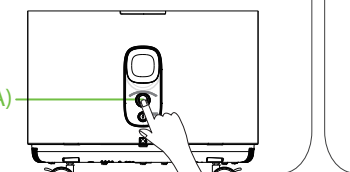

- 6** **EN** Press the button  on the front panel.  
**PL** Naciśnij przycisk  na przednim panelu.

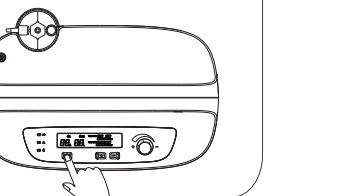

**EN** For detailed instructions, see the instruction manual.

**PL** Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Oxygen Concentrator  
Koncentrator tlenu

**WELLTEC OCK**

Quick manual  
Skrócona instrukcja

